

# Montage und Demontage der Switch-Blade® Scheren für die Laparoskopie


Snowden-Pencer® Produkte für die Laparoskopie

## Montage

1. Entnehmen Sie die Spitze der sterilen Verpackung.
2. Stellen Sie sicher, dass die Schneiden geschlossen sind und die klare Schutzhülle auf den Spitzen ist.
3. Schließen Sie den Griff und halten Sie das Instrument am Schaft fest.
4. Drehen Sie die Spitze im Uhrzeigersinn auf den Schaft und ziehen Sie handfest an.



5. Entfernen Sie die klare Schutzhülle. Bitte aufbewahren.
6. Öffnen Sie den Griff bis Sie "Klick" hören.

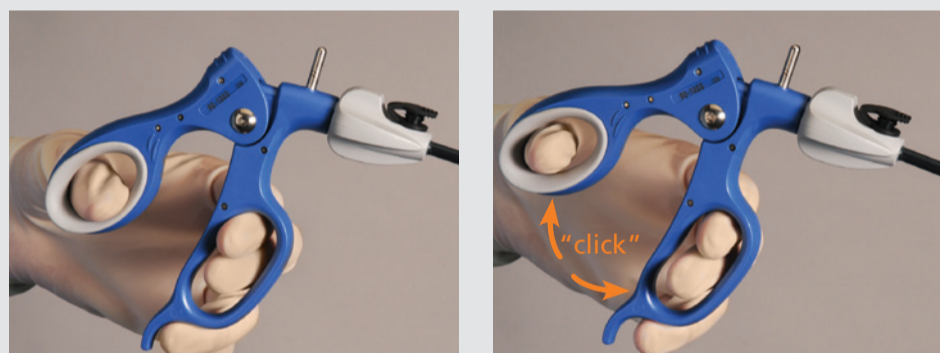

7. Kontrollieren Sie visuell, ob sich die Schneiden beim Öffnen und Schließen des Griffs bewegen. Somit stellen Sie sicher, dass die Verbindung korrekt hergestellt wurde.





## Demontage

1. Schließen Sie die Schneiden.
2. Stülpen Sie die klare Schutzhülle auf die Scherenspitze.
3. Greifen Sie das Instrument am Schaft. **Greifen Sie nicht den Griff, er muss frei bewegbar sein.**
4. Drehen Sie die Spitze gegen den Uhrzeigersinn vom Schaft. Spreizen Sie den Griff.



5. Ziehen Sie die Spitze nach vorne gerade vom Schaft weg. **Knicken Sie die Spitze nicht seitlich vom Griff ab, da dies den Schaft des Instrumentes beschädigen kann.**

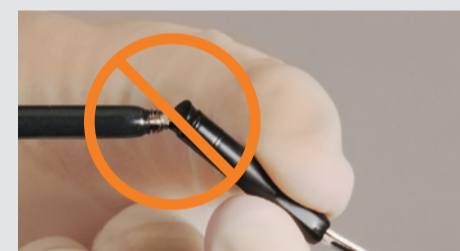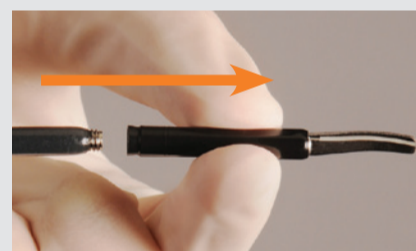

6. Entsorgen Sie die Scherenspitze entsprechend den Krankenhausrichtlinien.
7. Öffnen Sie den Griff zur visuellen Kontrolle des Führungsstabs.



8. Stellen Sie sicher, dass das Kugelgelenk nicht beschädigt ist.

**Think Blue** - Ergonomie, Vielseitigkeit und Langlebigkeit.

Alle Next Generation Snowden-Pencer® Instrumente haben ergonomische, blaue Griffe.

Katalognr.	Beschreibung
SP90-1053	Wiederverwendbarer Griff und Schaft, 36 cm
SP90-1253	Wiederverwendbarer Griff und Schaft, 45 cm
89-5103	Einmal-Scherenspitze Metzenbaum, gebogen
89-5303	Einmal-Scherenspitze Mini-Metzenbaum, gebogen
89-5115	Einmal-Scherenspitze, gerade

Für weitere Informationen oder wenn Sie eine Bestellung platzieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren V. Mueller®/Snowden-Pencer® Händler oder besuchen Sie [carefusion.com/thinkblue](http://carefusion.com/thinkblue).

Diese Anleitung ist nur als Hinweis gedacht. Für detailliertere Anweisungen, lesen Sie bitte die komplette Bedienungsanleitung, die gemeinsam mit den Switch-Blade Produkten ausgeliefert wird.