


Zerlegbare, ergonomische, laparoskopische Snowden-Pencer™ Take-Apart Instrumente

Montage und Demontage

Montage

Schritt 1

- Legen Sie die Einzelteile des Instruments bereit
- Das Instrument besteht aus 3 Komponenten: Griff, Schaft und Einsatz

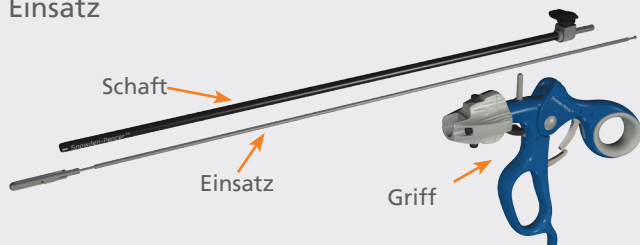


Schritt 2

- Schieben Sie den Einsatz in den Schaft und richten Sie die Schlitzte der Arbeitsspitze aus
- Drehen Sie den Einsatz im Uhrzeigersinn, bis die Ausrichtungsmarkierung des Einsatzes auf einer Linie mit der weißen Markierung am Schaft (neben dem Aufdruck „Snowden-Pencer“) liegt




Schritt 3

- Drehen Sie den Rotationsknopf, bis die Öffnung auf einer Linie mit dem HF-Anschluss für die Elektrochirurgie liegt
- Lösen Sie den Ratschenmechanismus, indem Sie den Ratschenhebel nach oben ziehen
- Öffnen Sie den Griff vollständig

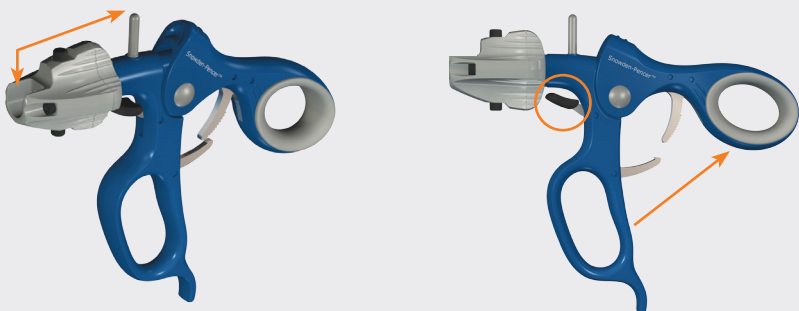

Schritt 4

- Drücken Sie die beiden Entriegelungsknöpfe und halten Sie sie gedrückt
- Schieben Sie Schaft und Einsatz in die Öffnung des Rotationsknopfes. Halten Sie dabei die Entriegelungsknöpfe gedrückt, bis der Spülanschluss in der Öffnung des Rotationsknopf platziert ist
- Lassen Sie die Entriegelungsknöpfe los und führen Sie den Schaft vollständig ein, bis er hörbar einrastet
- Betätigen Sie den Griff, um die Montage abzuschließen

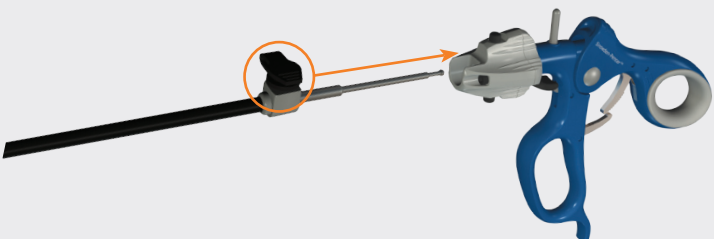

Demontage


Schritt 1

- Lösen Sie den Ratschenhebel und öffnen Sie den Griff vollständig




Schritt 2

- Drücken Sie die beiden Entriegelungsknöpfe am Rotationsknopf und halten Sie sie gedrückt
- Halten Sie die Entriegelungsknöpfe gedrückt und ziehen Sie Schaft und Einsatz vollständig aus der Öffnung des Griffes heraus

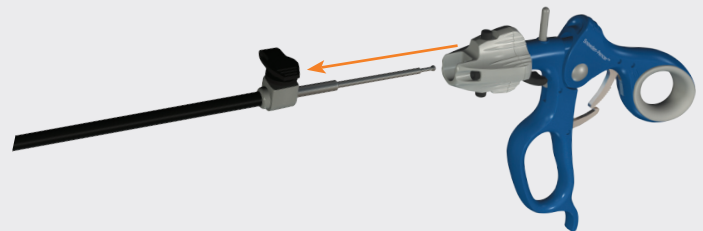


Schritt 3

- Drehen Sie den Einsatz im Schaft gegen den Uhrzeigersinn.

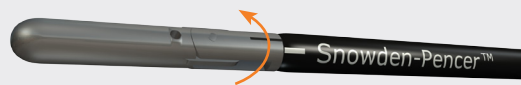

Schritt 4

- Ziehen Sie den Einsatz gerade aus dem Schaft heraus

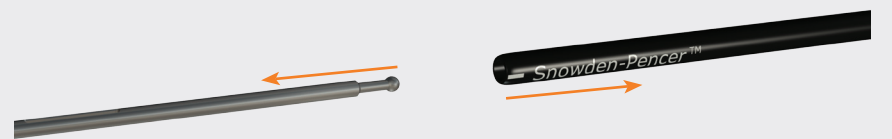

Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass der Griff vollständig geöffnet ist, wenn Sie das Instrument montieren bzw. demontieren.
- Eine angemessene Schmierung des Instruments vor der Sterilisation trägt zur ordnungsgemäßen Funktion und Langlebigkeit des Instruments bei.

Diese Anweisungen dienen lediglich als Referenz. Lesen Sie die im Lieferumfang der zerlegbaren, ergonomischen laparoskopischen Snowden-Pencer Instrumente enthaltene Gebrauchsanweisung vollständig durch.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner oder auf der Website carefusion.com/takeapart. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail an GMB-VM-Europe@carefusion.com senden.

 CareFusion
1500 Waukegan Road
McGaw Park, IL 60085 USA

carefusion.com

© 2012 CareFusion Corporation oder eine ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Snowden-Pencer ist eine Marke oder eingetragene Marke der CareFusion Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften. LIT12010de-ED01-Aug12

Medizinisches Gerät Klasse IIb gemäß Medical Devices Directive 93/42/EC - CE markiert von TÜV Product Service GmbH.

 CareFusion